

Uso diario de RESPIMAT® recargable

2
PULSACIONES
SEGUIDAS,
1 VEZ
AL DÍA



1. GIRAR

Mantén la tapa cerrada y **GIRA** la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).



2. ABRIR


ABRE la tapa.



3. PULSAR

Realiza una espiración lenta y completa. Cierra los labios alrededor de la boquilla sin tapar las válvulas de aire. Mientras realizas una inspiración lenta y profunda, **PULSA** el botón de liberación de dosis y sigue respirando lentamente.

Recarga sencilla de cartuchos

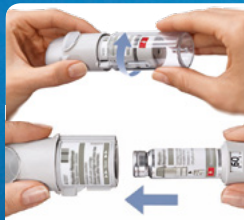

Liberación automática de la base transparente y bloqueo del inhalador cuando el cartucho está vacío.

- **Si tu médico te ha prescrito cartuchos de recarga:** retirar la base transparente que ha quedado aflojada, sacar el cartucho agotado e insertar un nuevo cartucho. Continuar con el paso 3 sobre cómo cargar el inhalador para el primer uso.
- **Si tu médico te ha prescrito un nuevo inhalador:** desechar tu inhalador en el punto SIGRE de la farmacia.



Indicador de dosis mejorado

Muestra cuántas pulsaciones quedan en el cartucho. Cuando el indicador se muestre amarillo, quedan menos de 10 pulsaciones. Cuando el indicador se muestre rojo, el cartucho se ha agotado.



En la farmacia puedes solicitar la carga inicial de tu inhalador RESPIMAT® y el soporte con el seguimiento de los cartuchos.



Consulta de forma gratuita cualquier duda que tengas con una enfermera experta llamando al 900 30 13 02. Horario de atención: lunes a viernes, 9-17h



Recargable hasta con un máximo de 6 cartuchos

Cómo cargar RESPIMAT® para su primer uso



RETIRAR LA BASE TRANSPARENTE

Con la tapa cerrada, pulsa el cierre de seguridad en el lateral y retira la base transparente.



INSERTAR EL CARTUCHO

Inserta el extremo estrecho del cartucho en el inhalador.
Sobre una superficie firme, aprieta con firmeza hacia abajo hasta oír un clic.



REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CARTUCHOS

Marca la casilla de verificación de la etiqueta del inhalador para realizar un seguimiento del número de cartuchos.
Coloca la base transparente en su sitio hasta oír un clic.



GIRAR

Mantén la tapa cerrada y gira la base transparente en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta).



ABRIR

Abre la tapa.



PULSAR

Dirige el inhalador hacia el suelo y PULSA el botón de liberación de dosis.
Cierra la tapa y repite los pasos GIRAR-ABRIR-PULSAR hasta 3 veces tras observar que se libera una nube.

EL INHALADOR ESTÁ AHORA LISTO PARA SU USO DURANTE UN MES DE TRATAMIENTO Y ADMINISTRARÁ 60 PULSACIONES (30 DOSIS).

